

Clean Blue flexion



Biosecurity begint bij het insemineren.

Het aantal biggen per zeug per jaar is bepalend voor de productiviteit van een fokbedrijf. De juiste hygiëne bij het insemineren van zeugen is een sleutel tot een succesvol KI programma. De introductie van de Clean blue flexion pipet in het Agro TopShop programma maakt een verbetering in hygiënische inseminatie voor ieder bereikbaar.

Kenmerken Clean Blue flexion

Kwaliteit

Hygiëne


Productiviteit

Gemak

Tijdbesparing

Bewezen

Wetenschappelijk onderzoek en praktische rapporten bevestigen het succes van het SafeBlue-concept. In praktijkproeven konden per 100 verschillende zeugen 30 tot 100 biggen meer worden verkregen.

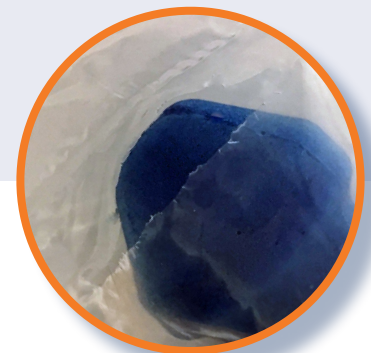

Concept

Het SafeBlue-hygiëneconcept - voor een aantoonbaar beter resultaat van inseminatie.

Een hygiënisch inseminatieproces door gebruik van een kiemvrije pipet verhindert binnendringen van micro-organismen zoals bacteriën en virussen in de baarmoeder. Dit is van cruciaal belang voor de diergezondheid en dus het succes van de inseminatie.

Uniek

De gesteriliseerde pipet is hygiënisch verpakt. De verpakking wordt als een beschermend omhulsel voor inbrengen gebruikt.

Het is niet nodig een aanvullende gel te gebruiken, deze is veelal een route van bacteriële besmetting.

Deze factoren maken het SafeBlue-concept, vanuit het oogpunt voor hygiënische inseminatie, zeer uniek.


Vormgeving en gebruik

De speciale vormgeving maakt het mogelijk de pipet te gebruiken bij zowel zeugen als gelten.

Slechts 3 handelingen.




1. De pipet 5 tot 10 cm inbrengen, dan door de hoes drukken.
2. Achterzijde openen en tube aansluiten.
3. Ophangen aan de inseminatielij.

Clean Blue flexion

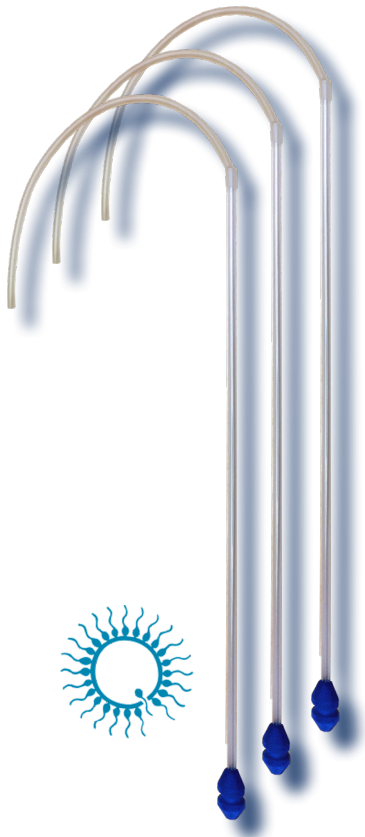

De voordelen:

- **Beschermhoes:** geen besmetting van de pipet tijdens het inbrengen, pas in de schede wordt de kop van de pipet door de huls gedrukt.
- **Geen tijdverlies** door uitgebreide voorbereiding, droge reiniging van de vulva is voldoende.
- **Geen handelingen met smeermiddelen.**
- **Perforatielijn** voor het makkelijk openen van de beschermkap.
- **Altijd schoon werken met bescherming** tegen bacteriële besmetting.
- **Elke pipet is gesteriliseerd** en afzonderlijk verpakt in een beschermende hoes.
- **De kop is al voorzien van een spermavriendelijk glijmiddel.**

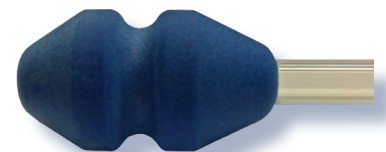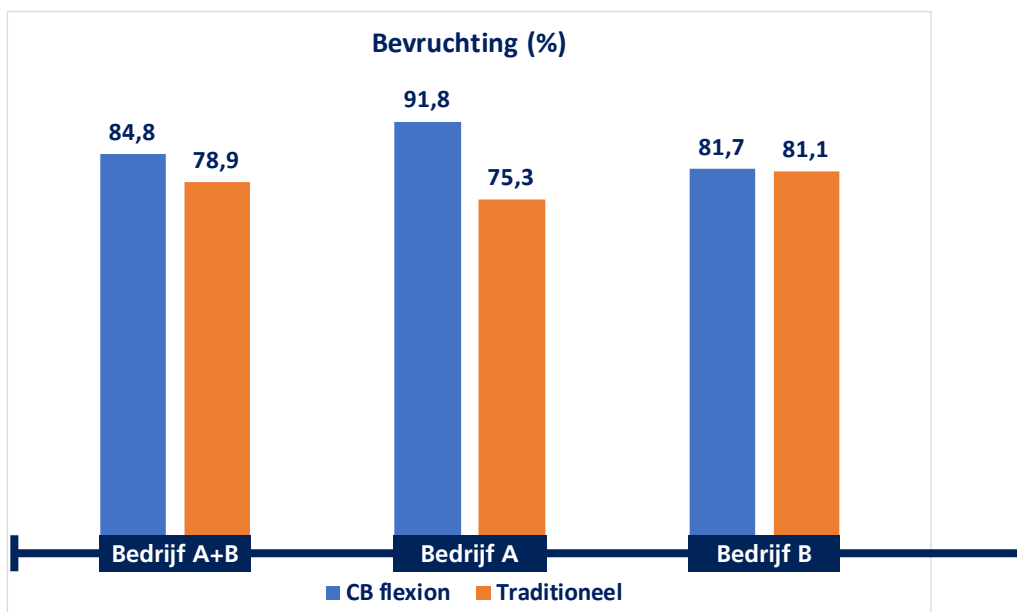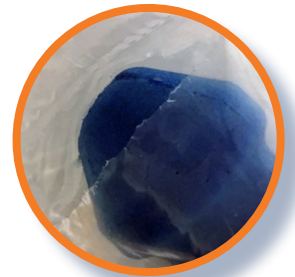

Bevruchtigingspercentage

Onderzoek aan de ' University of Giessen, Institute for Animal Breeding and Genetics ' wijst een beter resultaat uit bij het gebruik van de Clean Blue flexion.

Test met 2520 zeugen. Bedrijf A, 887 zeugen bedrijf B 1633 zeugen. Dubbele inseminatie met een traditionele pipet en een gesteriliseerd verpakte pipet volgens het Clean Blue concept.

Het geheel resulteerde in een betere bevruchting met 5,9%